




Conozca su medidor

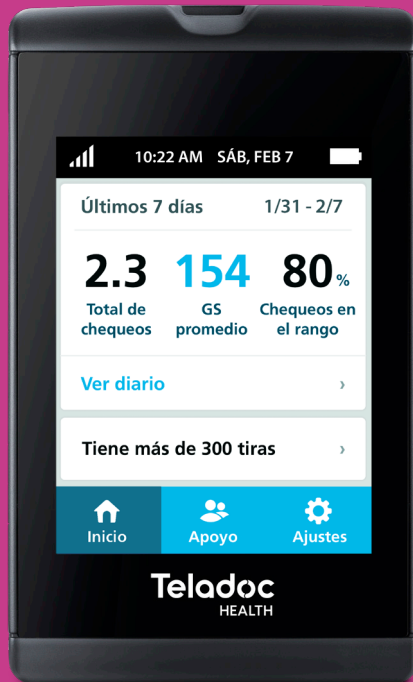




Vea todos sus datos en un solo lugar

Entienda mejor sus valores de azúcar en sangre directamente desde la pantalla de inicio, que le muestra datos clave de los últimos 7 días.

- **Cantidad promedio de chequeos por día**
- **Azúcar en sangre promedio**
- **Porcentaje de chequeos que están dentro de los rangos deseados según la Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association): 80-130 mg/dL antes de las comidas y 80-180 mg/dL una o dos horas después de las comidas.**

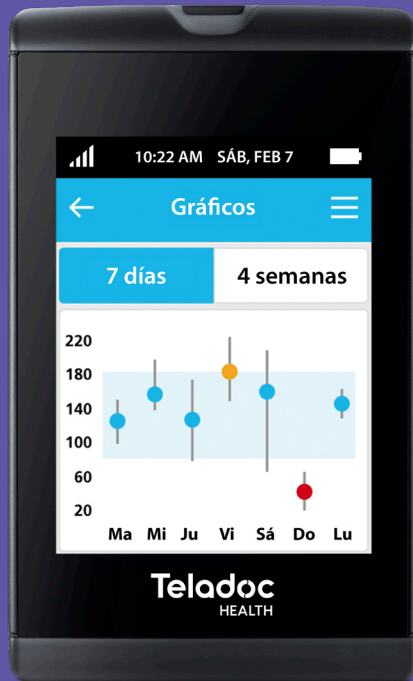


Entienda sus patrones y tendencias

Con imágenes fáciles de entender, podrá ver si sus valores se mantienen dentro del rango o si debe hacer ajustes en sus rutinas de salud.

HÁGALO ASÍ:

1. Seleccione **Ver diario** en la pantalla de inicio
2. Toque **Gráficos**
3. Elija **7 días** o **4 semanas**
4. Toque **≡** en la esquina superior derecha
5. Seleccione una **Vista de los datos: Todos los datos, Todas las comidas, Desayuno, Almuerzo, Cena**

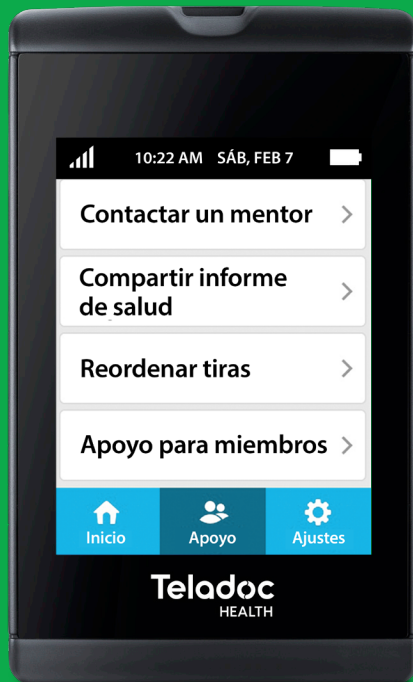

Haga pedidos ilimitados de tiras y lancetas

Reciba tiras de prueba y lancetas directamente en su domicilio, sin costo alguno para usted.

HÁGALO ASÍ:

1. Toque **Apoyo**
2. Toque **Reordenar tiras**
3. Toque **Sí** para confirmar su dirección postal



¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?

Llame a Asistencia para miembros al
(800) 945-4355 o envíenos un correo electrónico
a membersupport@teladochealth.com